

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

C02 コントローラ(CT210)ソフトウェア変更のご案内

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品におきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「C02コントローラ(CT210)」のソフトウェアの変更を実施いたしました。変更内容につきましてご案内差し上げますので、何卒、ご了承賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹 白

変更内容

コントローラの動作安定性を向上させるためのソフトウェアの調整

コントローラの使用条件や動作タイミングによって生じた下記の事象に対しソフトウェアを改良し、適正化を図りました。

- (1) バッテリー接続のタイミングによっては、残量が十分にあるバッテリーが接続されているにも拘らず、使用されずに非常用バッテリー駆動に切り替わる事象に対し、バッテリー残量の判定条件の見直しを行い、残量のあるバッテリーを確実に使用するように改良いたしました。(E-12 アラーム)
- (2) バッテリー関連アラーム(E-10,E-13)を誤検知する事象に対し、コントローラとバッテリーとのスマートバッテリー通信の安定性を向上し、誤検知を起こさないよう見直しを行いました。
- (3) 外部モニタにデータをダウンロードしている最中、接続ケーブルが抜けたり外部モニタの電源が途絶した際に、E-22 アラーム(血液ポンプのスピード下限異常)が発生する事象に対して、ダウンロード中断にても本事象が発生しないよう見直しを行いました。(本件は注意喚起文書についても配布済みで、既に外部モニタでも対策が施されております。)
- (4) クールシールユニットの圧力一定制御において、運転条件により圧力の振幅変動が大きくなる事象に対して、制御ソフトウェアを改善し振幅変動が大きくなる見直しを行いました。
- (5) その他

対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始
CT210	コントローラ	4562272470487	2014年2月17日出荷分より※ ソフトウェア Ver. 1.3.0

※変更品の識別として、製品と外箱にソフトウェアの Ver.番号を明記したシールを貼り付けております。



写真は Ver. 1.1.0 ですが『Ver. 1.3.0』と表示します

以上

〔お問い合わせ先〕

株式会社サンメディカル技術研究所 営業 G

TEL:0266-54-1900(代)