

2013年6月12日

お客様各位

株式会社サンメディカル技術研究所

EVAHEART コントローラ CT210 血液ポンプボタンカバー貼付のお願い

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、植込み型補助人工心臓 EVAHEART システムに使用いたします、コントローラ CT210 につきまして、血液ポンプボタンカバーを準備いたしました。

コントローラ CT210 は、外部モニターもしくはオペレーターキーがコントローラに接続されていない状態では、血液ポンプボタンを押して、ポンプを停止させることは出来ません。しかしながら、CSU 交換時等コントローラを操作している際に、誤ってポンプ停止ボタンが押されることがないように、血液ポンプボタンカバーを作成いたしました。

お手数とは存じますが、添付の手順書に従って血液ポンプボタンカバーを貼付してご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、新規出荷品に関しては、コントローラの付属品として同梱いたします。既にお使いのコントローラに関しては、別途血液ポンプカバーをお届けいたします。

ご迷惑、ご負担をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

謹白

貼付前



貼付後



対象製品

カタログ番号 (ユニットコード)	製品名	JANコード	変更開始ロット番号
CT210	コントローラ	4562272470487	CT210-0082 より

添付資料:「バックアップコントローラ封印シール貼り付け手順書」

〔お問い合わせ先〕

株式会社サンメディカル技術研究所 渉外チーム

TEL:0266-54-1900(代表) FAX:0266-58-6443 E-mail:tech@evaheart.co.jp

以上